

## MODE D'EMPLOI

**Kits de pré-nettoyage sur le lieu d'examen : détergent concentré à diluer et tampon de nettoyage dans une pochette scellée.**

### LEGENDE DES SYMBOLES :

Fabricant	Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé	Consulter les instructions d'utilisation	Représentant autorisé dans la Communauté européenne	À usage unique	Date de fabrication	Date de péremption	Référence	Numéro de lot
Non stérile	Marquage CE	Dispositif médical	Fabriqué sans latex naturel	Sans phtalates et DEHP				

### CODE PRODUIT ET DESCRIPTION

Code produit	Description
82348	Kits de pré-nettoyage – enzymatique concentré
82349	Kits de pré-nettoyage – neutre

### UTILISATION PRÉVUE

Conçu pour fournir tout le matériel nécessaire au pré-nettoyage manuel d'un endoscope flexible au chevet du patient, immédiatement après une procédure d'endoscopie. Compatible avec tous les endoscopes flexibles.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

L'utilisation de ce produit est réservée à du personnel médical formé et qualifié ou à des personnes dûment autorisées maîtrisant les techniques de nettoyage des endoscopes.

Reportez-vous également à la notice d'utilisation écrite du fabricant de l'endoscope.

### MODE D'EMPLOI

- Le kit de pré-nettoyage sur le lieu d'examen doit être utilisé immédiatement après l'intervention.
- Ouvrir l'emballage au niveau de l'encoche située en haut de la pochette.
- Ajoutez 500 ml d'eau du robinet en vous aidant du repère de remplissage situé au dos du sachet.
- Pressez le tampon de nettoyage à l'intérieur de la pochette pour libérer le détergent et le mélanger à l'eau. Utilisez le tampon de nettoyage pour essuyer le tube d'insertion.
- Placez l'extrémité distale de l'endoscope dans la pochette de nettoyage et aspirez la solution par le canal d'aspiration/de biopsie comme indiqué dans la notice d'utilisation écrite du fabricant de l'endoscope.
- Éliminez le kit de pré-nettoyage conformément aux directives de l'hôpital.

### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Pour obtenir les informations les plus récentes concernant le nettoyage des endoscopes, veuillez consulter les dernières lignes directrices en la matière.

**Tout incident grave survenu en rapport avec ce dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.**

### CONTRE-INDICATIONS

La pochette de pré-nettoyage ne doit pas être stérilisée en vue d'une utilisation ultérieure.

### STOCKAGE / CONDITIONNEMENT

Stockage :

Afin d'éviter tout dommage, les produits doivent être conservés dans leur emballage d'origine, à l'abri de la lumière du soleil, dans un endroit sec et frais.

Conditionnement :

Les pochettes de pré-nettoyage sont fournies dans un emballage individuel non stérile dans une boîte de 100 unités.

Nous recommandons d'utiliser la pochette de pré-nettoyage dans les 6 heures suivant son ouverture et la dilution.



### ÉLIMINATION DU PRODUIT


Après utilisation, ce produit peut présenter un risque biologique. Manipuler et éliminer le dispositif selon les pratiques en vigueur pour l'élimination des DASRI.

### Fabricant :



Partners for Endoscopy Ltd, Hartley House, Galveston Grove  
Fenton, Stoke on Trent, Grande-Bretagne

Mode d'emploi v1 Juillet 2024

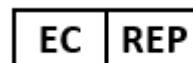

Advena Ltd, Tower Business Centre,  
2<sup>nd</sup> Flr., Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malte