


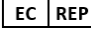












GEBRUIKSAANWIJZING

Clean-Up Bedside Kits - Voorreiniging: Geconcentreerd reinigingsmiddel voor verdunning en spons in een afgesloten zakje.

LEGENDA SYMBOLEN:

								
Fabrikant	Niet gebruiken als de verpakking geopend of beschadigd is	Gebruiksaanwijzing raadplegen	EC Verteg.	Voor eenmalig gebruik	Productiedatum	Uiterste gebruiksdatum	Catalogusnummer	Partijnummer
								
Niet steriel	CE-merkteken	Medisch hulpmiddel	Niet gemaakt met natuurrubber Latex	Niet gemaakt met DEHP				

PRODUCTCODES EN BESCHRIJVINGEN

Productcode	Beschrijving
82348	Clean-Up Bedside Kits - geconcentreerd enzymatisch
82349	Clean-Up Bedside Kits - neutraal

BEOOGD GEBRUIK

Alle benodigheden voor het handmatig voorreinigen van een flexibele endoscoop aan het bed van de patiënt, onmiddellijk na een endoscopieprocedure. Geschikt voor gebruik met alle soorten flexibele endoscopen.

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

Dit product mag alleen worden gebruikt door opgeleid en gekwalificeerd medisch personeel of een geautoriseerde persoon die bekend is met reinigingstechnieken voor endoscopen. Raadpleeg ook de schriftelijke gebruiksaanwijzing van de endoscoopfabrikant.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. De Clean-Up Bedside Kit moet onmiddellijk na de procedure worden gebruikt.
2. Scheur de verpakking open bij de inkeping aan de bovenkant van het zakje.
3. Voeg 500 ml kraanwater toe, waarbij u de vullijn op de achterkant van het zakje als richtlijn gebruikt.
4. Knijp het reinigingspad in het zakje uit zodat het wasmiddel vrijkomt, en meng het door het water.
. Gebruik het reinigingsdoekje om de inbrengbuis schoon te vegen.
5. Plaats het distale uiteinde van de endoscoop in het reinigingszakje en zuig de oplossing op via het afzuig-/biopsiekanaal, zoals aangegeven in de schriftelijke gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de endoscoop.
6. Gooi de Bedside Kit weg volgens de richtlijnen van het ziekenhuis.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Voor de meest recente informatie over endoscoopreiniging kunt u de actuele richtlijnen raadplegen. **Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot dit apparaat moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit.**

CONTRA-INDICATIES

Het Clean-Up Bedside-zakje mag niet worden gesteriliseerd voor hergebruik.

OPSLAG / VERPAKKING

Opslag:

Om schade te voorkomen, moeten producten in hun originele verpakking, uit de buurt van zonlicht, op een koele, droge plaats worden bewaard.

Verpakking:

De Clean-Up Bedside-zakjes worden geleverd in een individuele, niet-steriele verpakking in een doos van 100 stuks.

Wij raden aan om het Clean-Up-zakje binnen 6 uur na opening en verdunning te gebruiken.



VERWIJDERING VAN HET PRODUCT


Dit product kan na het gebruik een potentieel biologisch gevaar vormen. Hanteren en afvoeren in overeenstemming met de geaccepteerde medische praktijk.

Fabrikant:



Partners for Endoscopy Ltd, Hartley House, Galveston Grove
Fenton, Stoke on Trent, Groot Brittanië

Gebruiksaanwijzing v1 Juli 2024

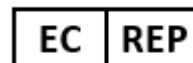

Advena Ltd, Tower Business Centre,
2nd Flr., Tower Street, Swatar, BKR 4013, Malta